

Antibac® Alkoholfri Overflatedesinfeksjon Sporicide

Produktfakta

Antibac® Alkoholfri Overflatedesinfeksjon Sporicide er basert på bredspektrert hydrogenperoksid som egner seg spesielt godt ved sykdomsutbrudd med f.eks. Clostridium Difficile. Produktet er bruksklart og rengjør samtidig som det effektivt dreper bakterier, virus, gjærsopp og sporer. I tillegg er væsken biologisk nedbrytbar og trygg - både for brukere og miljøet.

Bruksområder

De CE-merkede produktene er velegnet til bruk på ikke-invasivt medisinsk utstyr og harde, ikke-porøse, flater som tåler vann og syre, f.eks. rustfritt stål, plast, gummi og vinyl.

Antibac® Alkoholfri Overflatedesinfeksjon egner seg godt til bruk i blant annet helsevesenet, f.eks. ved Clostridium difficile-utbrudd og når det ikke er mulig eller ønskelig å bruke alkoholbasert desinfeksjon.

Bruksveiledning

Flytende: Påfør rikelig med væske direkte på overflaten eller fukt en klut/papir og gni utover. Wipes: Objektet fuktes godt med servietten.

Sørg for at overflaten er fuktig i henhold til angitt virketid. La objektet lufttørke. **Bruk hansker iht. EN 374. Produktet må ikke kombines med andre produkter.**

Virketider

Microorganism	Efficacy Test	Contact time (dirty conditions)
Bactericidal effect	EN 13727	30 sec
	EN 16615	1 min
Yeasticidal effect	EN 13624	1 min
	EN 16615	1 min
Virucidal effect	EN 14476	1 min
Sporicidal effect (C. difficile)	EN 13704	1 min* (*clean conditions) 3 min



Full virucidal effekt. Dreper bl.a MRSA, VRE, E-coli, influensa, RS-virus, murine norovirus, adenovirus, poliovirus, sopp, gram-positive og gram-negative bakterier.

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Forpakninger

603052 Antibac® Alkoholfri Overflatedesinfeksjon wipes (Sporicide)
603053 Antibac® Alkoholfri Overflatedesinfeksjon (Sporicide)

Boks à 80 stk.
750 ml spray